

04

DIMENSIONAMENTO STRINGINASSO

**Assicura una perfetta tenuta della semimaschera**

1. Rimuovere lo stringinasso dalla sede un foro alla volta facendo attenzione a non rompere il perno. (1-2)
 2. Prendere lo stringinasso tra le dita (3).
 3. Utilizzare un phon ad aria calda per scaldare la plastica nella parte centrale dello stringinasso. Alla perdita di elasticità spegnere il phon (4).
 4. Applicare una pressione per circa 30 secondi fino a ottenere la misura desiderata (5). Di seguito i 2 stringinasso a confronto, uno modificato e uno di produzione (6).
 5. A raffreddamento raggiunto inserire la nuova forma di stringinasso nell'alloggiamento, prima in un foro, assicurandosi che tutto il perno sia completamente passato. Ripetere la stessa procedura per il secondo foro (7-8).
- Se la tenuta non fosse sufficiente ripetere la procedura.

