



# 05

## MONTAGGIO CORPO VALVOLA DI USCITA

La semimaschera Covidfree-Ge serie 2020 viene fornita con corpo valvola di uscita già inserita e con filtro di uscita integrato.

Per togliere il corpo valvola afferrare saldamente la semimaschera e con movimento ondulatorio scalzare l'anello di tenuta dal labbro della semimaschera. A fine vita smaltire il corpo valvola - dopo averlo privato dell'elemento in silicone e averlo sanificato - nella plastica.

1. Avvicinare il nuovo corpo valvola al foro centrale della semimaschera (1).
  2. Inserire il corpo valvola con un movimento ondulatorio applicando una leggera pressione (2) fino a udire un click (3)
  3. A questo punto girare il corpo valvola assicurandosi di avere la linguetta di estrazione del tessuto filtrante rivolta verso l'alto (4).
- (In qualunque posizione venga inserito il corpo valvola è comunque garantita la protezione).

