

## 02

## MONTAGGIO FILTRI IN ENTRATA HME



1. Inserire l'adattatore valvola sull'attacco 22F/15M del vostro filtro (1)
2. Avvicinare il filtro dal lato dell'innesto al foro laterale della semimaschera (2).
3. Inserire il filtro leggermente inclinato (3) eseguire la manovra tenendo la semimaschera dalla parte interna (4) per agevolare il passo successivo.
4. Fare pressione sulla corona di alloggiamento del filtro presente sulla semimaschera e dilatare il poliuretano, fino a che il collo del filtro antivirale (HME attacco 22F/15M) sia inserito almeno 3 mm nel corpo della semimaschera (5).
5. Inserire la valvola a disco in silicone nel perno dell'adattatore (6)

